

Quick Instructions

CervicalStim™
Spinal Fusion Therapy



1. Press the **On/Off Button** to start.
2. The **LCD** will show your daily compliance percentage, then your prescribed daily treatment begins.
3. Wear the device over treatment site for **4 hours** every day.*
4. After treatment is complete, the device will power off.
5. To recharge, plug the charger into **Charging Port** and AC outlet.

*Clinical trial data demonstrates that success rates were significantly higher for patients who wore the device every day for the full treatment time. *Source: Premarket Approval P030034; FDA Approved December 2004.*

See the instruction manual for full usage information.

Orthofix products or services referenced herein are trademarks or registered trademarks of Orthofix Medical Inc. and its group of companies. All rights reserved.



Orthofix.com
BoneGrowthTherapy.com

MM-CS-10124001 Rev AA © Orthofix US LLC 06/2025





Instrucciones rápidas

CervicalStim™
Spinal Fusion Therapy



1. Pulse el **Botón de encendido/apagado** para comenzar.
2. La pantalla **LCD** le mostrará su porcentaje de cumplimiento diario; después comenzará su tratamiento diario prescrito.
3. Use el estimulador sobre el lugar de tratamiento durante **4 horas** todos los días.*
4. Después de completar el tratamiento, el dispositivo se apagará.
5. Para recargarlo, enchufe el cargador en el **Puerto de carga** y en un tomacorriente de pared de CA.

*Los datos de ensayos clínicos demuestran que las tasas de éxito fueron considerablemente más altas en los pacientes que usaron el dispositivo todos los días durante el tiempo completo de tratamiento. Fuente: Aprobación premercado P030034; aprobado por la FDA en diciembre de 2004.

Consulte el manual de instrucciones para la información completa de uso.



Orthofix.com
BoneGrowthTherapy.com

MM-CS-10124001 Rev AA © Orthofix US LLC 06/2025

